

KARTA GWARANCYJNA

UWAGA : FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 - dokładny adres reklamującego • dowód zakupu • kontakt telefoniczny • dokładny opis usterki
 - sytuację w której usterkę stwierdzono • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów
Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta
Reklamacji nie podlegają:
 - Bezpieczniki • Przewody zasilające • Grzałki elektryczne, termostaty • Produkty zalane wodą • Żarówki
 - Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapalenia w szczególności lampy UV i frezarki
 - Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji • Produkty z przeceny, wyprzedaży ekspozycji lub gratisy
 - Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy (1 h pracy 30 min przerwy) • Głowice do frezarek • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu (stoliki, szafki, biurka) • Potłuczone szklane podszespoły i akcesoria urządzeń • Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
 - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone , Należy pamiętać aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodnie z prawdą

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

.....
Podpis sprzedawcy
pieczęć



KOMBAJN KOSMETYCZNY 14.1

- PRZY PRACY Z URZĄDZENIEM ZALECAMY UŻYWANIE PRODUKTÓW ACTIV -



U W A G A

Zabieg może przeprowadzać personel wykwalifikowany posiadający licencję (dyplom) ukończenia szkoły kosmetycznej. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wypadki oraz uszkodzenia ciała związane z niewłaściwym zastosowaniem urządzenia. UWAGA! Urządzenie elektroniczne, musi być uruchamiane w temp. pokojowej po uprzednim odstaniu min. 3 h.

FUNKCJE:

- wysoka częstotliwość
- ultrasonic
- spray
- vacuum
- usuwanie zmian skórnych
- galvan
- brush
- wapozon
- ozon
- lampa Woods'a
- lampa - lupa
- głowica ciepło-zimno
- mikrodermabrazja
- skin scrubber

GŁOWICA CIEPŁO-ZIMNO

Posiada system chłodzenia, który łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia na skórze. Istnieje również opcja rozgrzewania, która stosowana jest przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych.

ELEKTROKOAGULACJA-USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH (REMOVE SPOT)

Dzięki tej funkcji usuwane są brodawki, kurczaki, włókniaki za pomocą prądu wysokiej częstotliwości.

D'ARSONVAL

Prądy D'arsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Mają działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Urządzenie posiada trzy rodzaje pelot w zależności od zastosowania.

PĘDZEL (BRUSH)

Służy do masażu skóry, wykonywanego przy pomocy delikatnych szczoteczek.

Ma zastosowanie w demakijażu skóry – usuwa zanieczyszczenia skórne.

Przyspiesza przemianę materii i ułatwia wchłanianie substancji leczniczych.

GALWAN

Prąd stały stosowany przy nerwobólach, trądziku różowatym, przewlekłych zapaleniach nerwów itd.

ULTRADŹWIĘKI

Dwie głowice emitujące fale dźwiękowe o charakterze mikromasażu.

Stosowany do wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry.

MIKRODERMABRAZJA

Mikrodermabrazja diamentowa zawiera głowice o różnej gradacji, powoduje złuszczenie powierzchniowe naskórka co powoduje wygładzenie, oczyszczenie i ujędrnienie skóry. Jest to zabieg bezbolesny, w pełni kontrolowany. Zmniejsza zmarszczki oraz oczyszcza skórę. Może być stosowany w leczeniu trądziku jak i odmładzania skóry. Efekt jedwabistej i promienistej skóry widoczny już po 1 zabiegu.

WAPOZON

Wapozon wytwarza gorącą parę oraz posiada funkcję ozonu. Wyposażony w zegar pozwala na regulację czasu zabiegu. Ramię posiada dwie płaszczyzny obrotu.

LAMPKA - LUPA

Lampa-Lupa pozwala na oglądanie skóry w powiększeniu (5dpi.) przy doskonałym oświetleniu. Jej budowa umożliwia łatwe ustawienie bez potrzeby blokowania ramion. Estetyczna i lekka konstrukcja bez zewnętrznych sprężyn.

VACUUM -SPRAY

Służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń skórnych (zaskórników otwartych), poprawia krążenie, likwiduje worki pod oczami i liftinguje skórę oraz zrasza powierzchnię skóry preparatami tonizującymi.

LAMPKA WOODA

Lampa kwarcowa, emitująca promienie nadfioletowe stosowane w kosmetologii i dermatologii (np. do rozpoznania grzybicy).

SKIN SCRUBBER

Peeling kawitacyjny jest to peeling, który wykorzystuje zjawisko kawitacji. Pod wpływem ultradźwięków na powierzchni skóry dochodzi do rozbicia komórek warstwy rogowej naskórka bez jakichkolwiek uszkodzeń komórek położonych głębiej.

A MIKRODERMABRAZJA VACUUM&SPRAY

B ELEKTROKOAGULACJA

C D'ARSONVAL

D PĘDZEL/BRUSH

E GALVANIC

F SKIN SCRUBBER

G ULTRASONIC

A MIKRODERMABRAZJA VACUUM&SPRAY

- A01 WYŚWIETLACZ CZASU
- A02 REGULACJA CZASU
- A03 REGULACJA VACUUM
- A04 START/PAUZA



B ELEKTROKOAGULACJA

- B01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- B02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- B03 START/PAUZA

C D'ARSONVAL

- C01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- C02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- C03 START/PAUZA

- A01
- A02
- B01
- B02
- C01
- C02
- D01
- D02
- E01
- E02
- E03
- F01
- F02
- F03
- G01
- G02
- G03
- G04

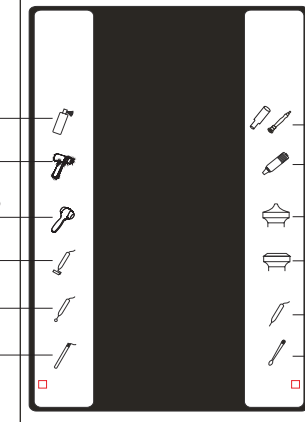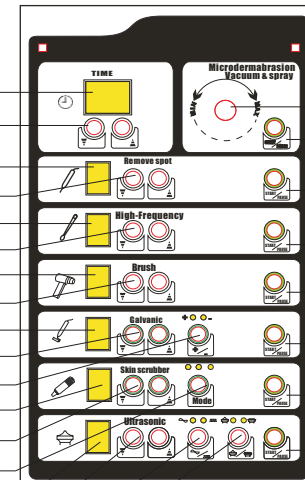

- 1 SPRAY
- 2 BRUSH
- 3 GŁOWICA CIEPŁO-ZIMNO
- 4 GALVANIC
- 5 GALVANIC
- 6 GALVANIC
- MIKRODERMABRAZJA VACUUM
- SKIN SCRUBBER
- GŁOWICA-OCZY
- GŁOWICA-TWARZ
- ELEKTROKOAGULACJA
- WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

D PEDZEL/BRUSH

- D01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- D02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- D03 START/PAUZA

E GALVANIC

- E01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- E02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- E03 WYBÓR BIEGUNU +/-
- E04 START/PAUZA

F SKIN SCRUBBER


- F01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- F02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- F03 WYBÓR FALI
- F04 START/PAUZA

G ULTRASONIC

- G01 WYŚWIETLACZ INTESYWNOSCI
- G02 REGULACJA INTESYWNOSCI
- G03 WYBÓR FALI
- G04 WYBÓR GŁOWICY
- G05 START/PAUZA

CZAS PRACY URZĄDZENIA: 40 min. pracy / 20 min. przerwy

Rys. 2

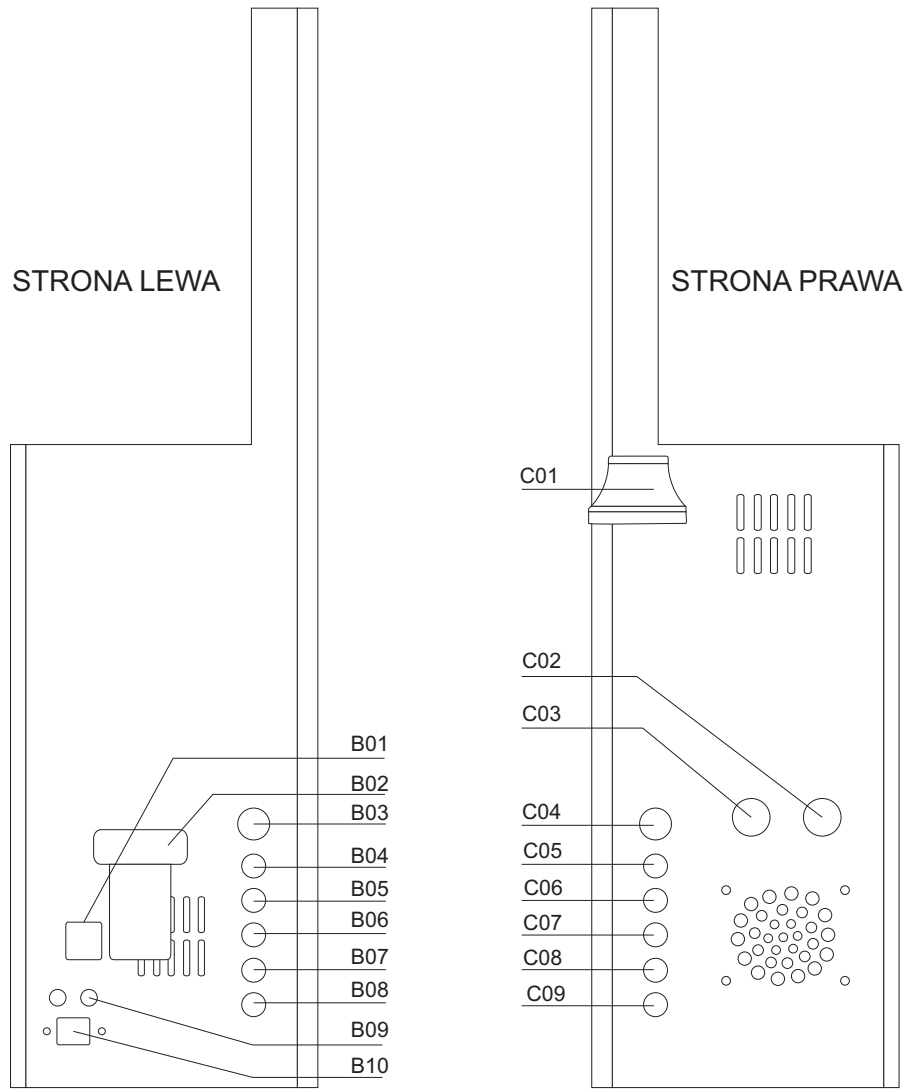


- B01 WŁĄCZNIK
- B02 FILTR SIATKOWY Z ODSTOJNIKIEM
- B03 WYJŚCIE (SPRAY)
- B04 WYJŚCIE (PĘDZEL-BRUSH)
- B05 WYJŚCIE (MŁOTEK CIEPŁO-ZIMNO)
- B06 WYJŚCIE (GALVANIC)
- B07 WYJŚCIE (GALVANIC)
- B08 WYJŚCIE (GALVANIC)
- B09 BEZPIECZNIK URZĄDZENIA
- B10 GNIAZDO ZASILAJĄCE

- C01 UCHWYT DO LAMPY LUPY
- C02 WYJŚCIE (LUPA)
- C03 WYJŚCIE (LAMPA WOODS'A)
- C04 WYJŚCIE (MIKRODERMABRAZJA)
- C05 WYJŚCIE (SKIN SCRUBBER)
- C06 WYJŚCIE (ULTRASONIC OKO)
- C07 WYJŚCIE (ULTRASONIC TWARZ)
- C08 WYJŚCIE (ELEKTROKOAGULACJA)
- C09 WYJŚCIE (WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ)

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODZESPOŁÓW

Rys. 3

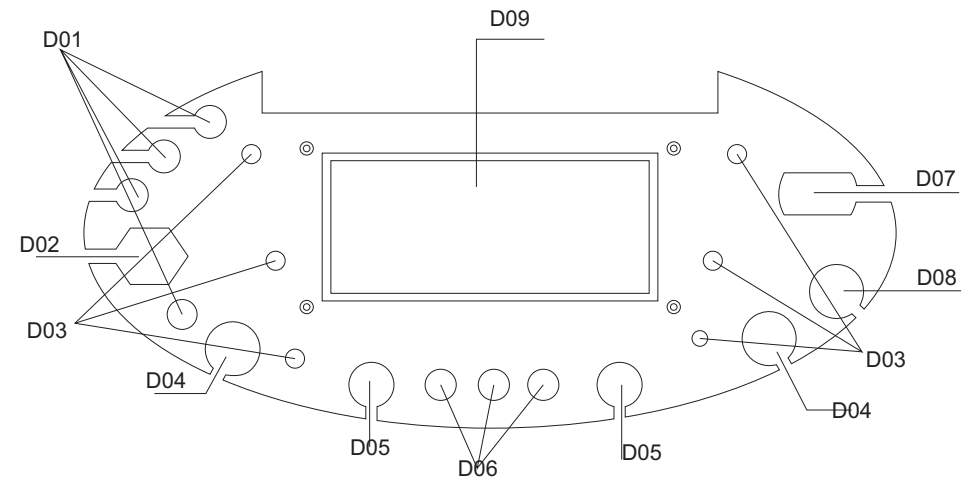

- D01 GALVANIC BAR
- D02 MŁOTEK CIEPŁO-ZIMNO
- D03 BRUSH - KOŃCÓWKI
- D04 ULTRASONIC PROBES
- D05 SPRAY - BUTELKI
- D06 KOŃCÓWKI DO MIKRODERMABRAZJI
- D07 RĄCZKA DO BRUSH
- D08 WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
- D09 SZKLANE AKCESORIA

MIKRODERMABRAZJA


ZASTOSOWANIE:

- wskazania do mikrodermabrazji
- blizny potrądzikowe
- zaskórniki, prosaki
- rozszerzone pory
- szorstki, zrogowaciały naskórek
- wiotkość skóry
- odmładzanie skóry i likwidacja delikatnych zmarszczek wokół oczu ust i szyi
- rozstępny
- suchość skóry
- przebarwienia i odbarwienia
- uszkodzenia posłoneczne skóry (twarz, ręce, szyja)
- blizny zanikowe i przerosłe
- rogowacenie okołomieszkowe
- trądzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowy)
- łojotok
- zabieg jest idealnym przygotowaniem do zabiegów laserowych: fotoodmładzania, rozszerzonych, popękanych naczyń krwionośnych oraz przebarwień

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY:

• PRZED URUCHOMIENIEM MIKRODERMABRAZJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ FILTR SIATECZKOWY

MONTAŻ FILTRA SIATECZKOWEGO:

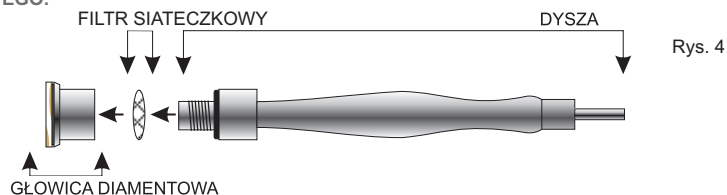

• obsługa filtra siateczkowego z odstojnikiem: rys. 8

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU MIKRODERMABRAZJI:

Nie są wymagane jakieś specjalne zabiegi przygotowujące skórę do mikrodermabrazji, ale na 5 dni przed wykonaniem zabiegu należy unikać:

- chemicznych kremów do depilacji
- elektrolizy, woskowania
- szorstkich gąbek/szczoteczki do czyszczenia twarzy
- żelów i kremów peelingujących do twarzy

PRZEBIEG ZABIEGU:

Należy zmyć makijaż z twarzy emulsją do demakijażu Sensitive MayStar następnie stonizować skórę pobudzającą wodą termalną Sensitive MayStar, odczekać do wyschnięcia lub osuszyć skórę chusteczką. W trakcie zabiegu przykładana jest do skóry specjalna diamentowa głowica z otworem, którą przesuwa po całej złuszczonej powierzchni. Powierzchnia głowicy od strony skóry pokryta jest drobnymi kawałkami diamentu, a efekt eksfoliacji uzyskuje się poprzez działanie ścierające diamentu oraz zasysanie skóry przez pompę mieszczącą się w jednym z urządzenia.. Procedura trwa około 20-25 minut. W czasie jednego zabiegu istnieje możliwość ścierania od 5 do 15 razy całą poddaną zabiegowi powierzchnię (np. twarz). **Zabiegi mikrodermabrazji są bezbolesne.** Na samym początku odczuwa się zassanie, a następnie masowanie i lekkie ścieranie skóry. W przypadku osobniczej nadwrażliwości istnieje możliwość znieczulenia skóry kremem przed zabiegiem.

Przebieg zabiegu mikrodermabrazji z zastosowaniem zestawu Maystar Satin Expression Lines Collection na zmarszczki mimiczne :

1. Zmywamy twarz, szyję, dekolt i okolice oczu emulsją do demakijażu z serii Sensitive MayStar używając chusty zabiegowej, następnie tonizujemy skórę wodą termalną z serii Sensitive.
2. Skórę dokładnie osuszyć przy użyciu chusteczek higienicznych .
3. Włączyć przycisk zasilania i dostosować intensywność ciśnienia do odczuć klienta.
3. Przykładając głowicę do skóry delikatnie naciągnąć skórę kciukiem i palcem wskazującym przesuwając głowicę 2-3 razy w tym samym miejscu zgodnie z ruchami głowki pokazanymi na rysunkach.(czas zabiegu mikrodermabrazji nie może trwać dłużej niż 20-25minut)
4. Głowicą ciepło-zimno wykonujemy masaż twarzy najpierw stroną zimną ,która ukoi skórę po zabiegu a następnie stroną ciepłą w celu rozgrzania skóry aby miała większe możliwości wchłaniania preparatów jakie będziemy aplikować na zakończenie zaiegu.
5. Aplikujemy miejscowo na istniejące zmarszczki za pomocą roll-on Lines Concentrate (Satin Expression)i wykonujemy stymulację przy użyciu głowic ultradźwiękowych wprowadzając preparat w głąb skóry .
6. Przelewamy do miseczki 20 ml Lines Face Lotion (Satin Expression).
7. Do miseczki z płynem Lines Face Lotion (Satin Expression) umieszczamy Face Mask (maska ze skompresowanych włókien) i czekamy 4 - 6 min. W tym czasie maska wchłonie składniki aktywne.
8. Przy pomocy pincety wyjmujemy Face Mask z miseczki i rozkładamy. Nakładamy na twarz.
9. Rozprowadzamy z miseczki Lines Face Lotion na całą maskę przy użyciu pędzla. Pozostawiamy Face Mask na 20 min. Jest to wystarczający czas, aby skóra całkowicie wchłonęła czynniki zawarte w masce.
10. Rozprowadzamy na twarz Lines Gel (Satin Expression). Masujemy ruchami okrężnymi, ze szczególnym uwzględnieniem skóry czoła, podbródka oraz okolic nosa.
11. Nakładamy na okolice oczu, twarz, szyję i dekolt emulsję Lines Finisher (Satin Expression).




EFEKT ZABIEGU

Znacznie sptyca zmarszczki głębokie i drobne, poprawia kontur twarzy, likwiduje worki pod oczami, rozjaśnia i wzmacnia skórę oraz stymuluje pracę komórek, poprawia elastyczność i napięcie, rewitalizuje i odnawia komórki. Zabieg pobudza syntezę kolagenu. W efekcie czego cera nabiera pełnego młodości wigoru.

Po zabiegu polecamy wprowadzenie poprzez masaż ręczny lub głowicami ultradźwiękowymi dowolnego serum w zależności od rodzaju skóry i jej problemów.

Do wyobu polecamy:

- serum z witaminą C z serii Cellular Expression MayStar - serum wybielające, likwidujące przebarwienia, regenerujące (do skóry tłustej, z przebarwieniami i normalnej)
- serum złote Gold Cellular Expression MayStar - serum o silnym działaniu wzmacniającym skórę , aktywnie nawilża, ujędwnia naskórek i skórę właściwą, przywraca elastyczność, naturalny zdrowy kolor, pozostawia skórę jedwabiącą gładką i miękką (do cery suchej i normalnej, wysuszonej słońcem lub solarium) oparte na kwasach AHA, bogaty w kw. linolowy i alfa-linolenowy
- serum Energy Cellular Expression MayStar - regenerujące i stymulujące pobudzenie wytwarzania elastyny i kolagenu typu I i IV. Redukuje zmarszczki, zwiększa spójność warstwy kolczystej naskórka oraz ułatwia gromadzenie lipidów międzykomórkowych skóry (dla skóry dojrzałej z oznakami starzenia)
- serum likwidujące zmarszczki Satin Expression MayStar - wygładza zmarszczki mimiczne, regeneruje, ujędwnia, nawilża działa wyraźnie odmładzająco (do cery suchej, normalnej, ze zmarszczkami mimicznymi)

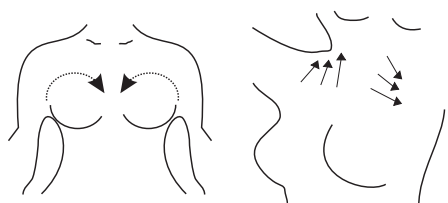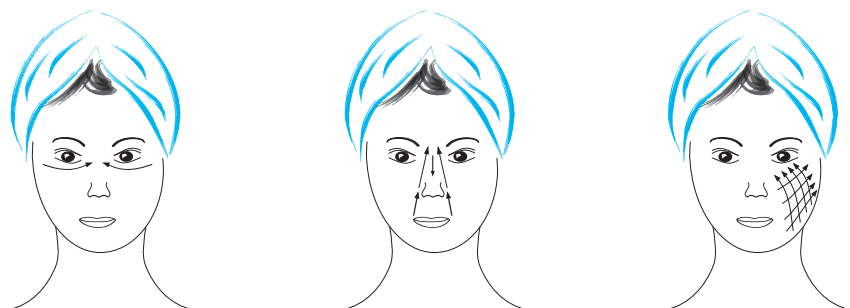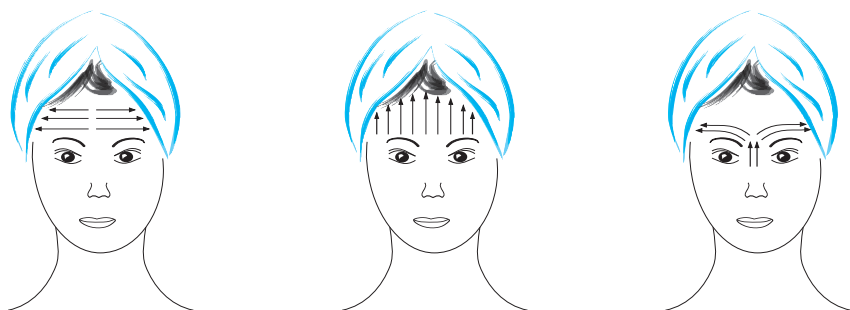RUCHY GŁOWICY:

Na zakończenie zabiegu polecamy maseczkę algową Touch of Beauty firmy ACTIV, która doskonale uspokaja skórę po każdym zabiegu, likwiduje obrzęki, zaczerwienienia, przywraca naturalny koloryt skóry, nawilża). Dobrze jest polecić klientce do stosowania w domu między kolejnymi zabiegami kremów z serii Sensitive na dzień, na noc lub kremu hypoalergicznego dla cery szczególnie wrażliwej, suchej, seria Sensitive przeznaczona jest dla skóry wrażliwej, która nie toleruje żadnych kosmetyków.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Zazwyczaj trzeba przeprowadzić od 2 do 10 zabiegów (średnio 5) w odstępach od 1 tygodnia do 4 tygodni (co 7 - 10 dni w zabiegach odmładzających i 4 tygodnie w leczeniu trądzika). Zależy to od wskazań i oczekiwań pacjenta. Po każdej mikrodermabrazji poprawa jest coraz bardziej widoczna. W celu podtrzymania i utrwalenia uzyskanych wyników zaleca się co 4 - 6 tygodni ponowne wykonanie mikrodermabrazji. Zabiegi mikrodermabrazji można przeprowadzać na wszystkich typach skóry i każdej części ciała np. twarzy, szyi, dekoltu, pleców dłoni czy nóg.

BEZPIECZEŃSTWO ZABIEGU:

Urządzenie do mikrodermabrazji firmy ACTIV BEAUTY GOLD LINE spełnia wymagane normy europejskie (CE). Głowice diamentowe bezpośrednio stykające się z powierzchnią skóry każdorazowo są sterylizowane lub dezynfekowane z użyciem specjalnych płynów ANIOSYME D d 1 . MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWY ACTIV BEAUTY GOLD LINE pozbawiony jest tych działań niepożądanych.

ZALETY MIKRODERMABRAZJI:

- bezpieczna, kontrolowana głębokość ścierania
- pobudzenie produkcji kolagenu
- eliminacja patogennych drobnoustrojów z powierzchni skóry (np. Propionibacterium acnes)
- zabieg jest właściwie bezbolesny
- możliwość częstego powtarzania
- brak krwawienia i urazu skóry
- brak długiego okresu gojenia
- alternatywa dla osób nie tolerujących peelingu chemicznego

NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ W PRZYPADKU:

- menstruacji
- skóry opalanej
- skóry płytko unaczynionej
- ciąży

GŁOWICE DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA:

ZESTAW GŁOWIC MOŻNA DOKUPIĆ OSOBNO



9 głowic o różnej gradacji w zestawie

Intensywność zawsze dostosujemy do odczuć klienta. W trakcie zabiegu zmieniamy głowice w zależności od rodzaju skóry klienta oraz miejsca, na jakim ten zabieg wykonujemy. Na przykład: okolice oczu - głowica delikatniejsza, o mniejszej gradacji (D180) skóra wrażliwa, rozszerzone naczynka (D180) skóra ziemista, źle ukrwiona, głowica o większej gradacji (D120 lub D160)

STANDARDOWE PROCEDURY:

- Jeżeli urządzenie nie pracuje z wymaganą mocą należy sprawdzić:
- zabrudzenie filtra siatkowego (rys. 4)
 - zabrudzenie filtra siatkowego z odstojnikiem (rys. 8)
 - przepustowość szybkozłącza na wężu i przy urządzeniu (rys. 8)



PRZECIWWSKAZANIA DO MIKRODERMABRAZJI:

- zakażenia wirusowe: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny
- zakażenia bakteryjne: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa
- zakażenia grzybicze
- trądzik krostkowy, ropowiczy
- trądzik różowaty
- skóra powiek
- przeczasy, nadżerki (uszkodzenia ciągłości skóry)
- nowotwory skóry i znamiona
- naczyniaki jamiste
- terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem-wskazana co najmniej 3 miesięczna przerwa
- skłonność do keloidów (bliznowców)
- zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (do 2 miesięcy)

OBJAWY NIEPOŻĄDANE PO MIKRODERMABRAZJI:

- uczucie mrowienia, pieczenia, świądu-objawy te szybko ustępują
- przetrwały rumień (do 24-48 godzin); każdego następnego dnia zaczerwienienie skóry jest coraz mniej widoczne i nie przeszkadza w zrobieniu makijażu oraz w aktywnym wykonywaniu codziennych czynności
- nadwrażliwość skóry
- wybroczyny u osób stosujących aspirynę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (utrzymują się 24-72 godziny)


WPŁYW MIKRODERMABRAZJI NA SKÓRĘ: PIELĘGNACJA SKÓRY W WARUNKACH DOMOWYCH:

- poprawa jakości skóry (struktury i kolorytu)
- zwiększenie elastyczności
- zmniejszenie rozszerzonych porów, usunięcie zaskórników
- spłycenie powierzchniowych zmarszczek, wygładzenie skóry
- usunięcie przebarwień (posłonecznych lub starczych)
- zmniejszenie łojotoku
- skóra świeższa i młodszą
- unikanie opalania przez pierwsze 48 godzin od zabiegu
- unikanie kąpieli w chlorowanej wodzie (baseny) do 48 godzin po zabiegu
- picie 8-12 szklanek wody mineralnej dziennie (uelastycznia dodatkowo skórę)
- pacjenci z przebarwieniami w przerwie między kolejnymi zabiegami powinni używać preparatów zawierających hydrochinon w stężeniu co najmniej 2%; preparaty wybielające powinny być nakładane 24 godziny po zabiegu mikrodermabrazji 2 razy dziennie
- na dzień zaleca się stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze co najmniej 25

DEZYNFEKCJA GŁOWIC:

Do dezynfekcji stosować koncentrat ANIOSYME DD1
Dezynfekcję przeprowadzać w naczyniu do tego przeznaczonym.
STOSOWAĆ TERMICZNĄ DEZYNFEKCJĘ GŁOWIC (AUTOKLAW)

1) DEZYNFEKCJA PŁYNEM ANIOSYME DD1

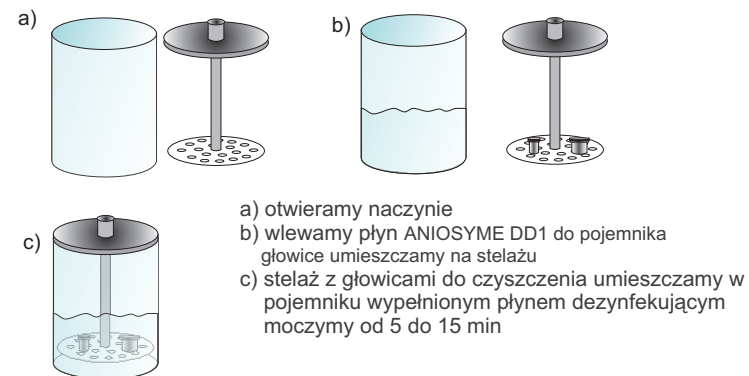

Płyn ANIOSYME DD1 używamy tylko wg instrukcji podanych na opakowaniu.

2) CZYSZCZENIE GŁOWIC MYJKĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ



Technologia mycia za pomocą ultradźwięków zapewnia szybkie i bardzo skuteczne czyszczenie powierzchni. Energia wytwarzana przez przetworniki ultradźwiękowe w płynie myjącym dociera do najbardziej niedostępnych miejsc. Zjawisko kawitacji powoduje, że drgania przenikają przez materiał w związku z czym brud jest usuwany z całej powierzchni. Ultradźwięki w roztworze myjącym wytwarzają fale ciśnienia w postaci implodujących pęcherzyków a te z kolei odrywają zanieczyszczenia z powierzchni mytych elementów. W myjkach ultradźwiękowych stosuje się wodne roztwory środków myjących lub płyny organiczne.
Głowice powinny być czyszczone po każdym zabiegu.


3) DEZYNFEKCJA AUTOKLAWEM TYPU B - TANDA II



autoklaw: hermetycznie zamknięty, ogrzewany zbiornik służący do wyjaławiania w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu, np.. narzędzi kosmetycznych, chirurgicznych, środków spożywczych i farmaceutycznych. Posiada 14 programów sterylizujących.


drukarka: drukuje informacje o ostatniej przeprowadzonej sterylizacji

MIKROMASAŻ

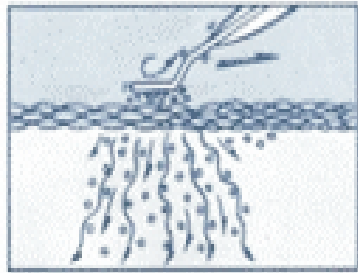

rys. 1

LIKWIDACJA ZMARSZCZEK

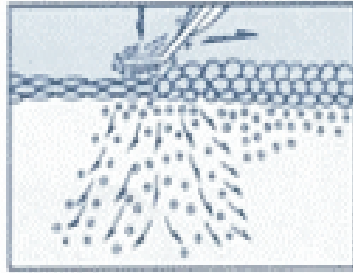

rys. 2


Rys. 1 Przycisk M

Mikromasaż – wykonujemy go stroną odgiętą szpatuły ku górze

Rys.2 Przycisk C

Likwidacja zmarszczek – Tak samo jak przy mikromasażu, ale uciskając szpatułą w dół

PEELING

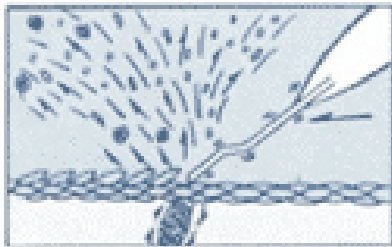

rys. 3

Rys.3 Przycisk P

Peeling – Wykonujemy go stroną zagiętą szpatuły w kierunku skóry, przesuwając szpatułę od siebie, zgodnie z przebiegiem mięśni.

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odstąpienie młodszej warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia preparatów.

Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra.

Skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

Peeling kawitacyjny jest to peeling, który wykorzystuje zjawisko kawitacji. Pod wpływem ultradźwięków na powierzchni skóry dochodzi do rozbicia komórek warstwy rogowej naskórka bez jakichkolwiek uszkodzeń komórek położonych głębiej.

Zabieg trwa około 15-20 minut.

Przeciwwskazania:

- przerwana ciągłość skóry
- ciąża
- metalowe implanty w ciele
- choroby nowotworowe
- rozrusznik serca
- epilepsja
- zmiany ropne na skórze
- stany alergiczne, wirusowe i bakteryjne skóry

Dezynfekcja:

Dezynfekujemy tylko metalową część szpatuły, używając do dezynfekcji Aerodesin 2000.

Spryskujemy wacik bezpyłowy i przecieramy powierzchnię metalową, którą wykonujemy zabieg.

Czynność należy powtórzyć czterokrotnie.

Przebieg zabiegu:

1. Włączyć urządzenie i ustawić odpowiednio: czas oraz rodzaj wykonywanego zabiegu.
2. Podczas peelingu szpatuła powinna być ustawiona pod kątem 45st. (rys.3)
3. Mikromasaż i likwidacja zmarszczek (rys. 1 i 2)
4. Po zakończeniu zabiegu należy wyłączyć urządzenie i zdezynfekować szpatułę.

G A L V A N I Z A C J A

D A R S O N V A L

D'ARSONVAL (prądy wielkiej częstotliwości) o gasnącym przebiegu fali, gdzie przerwa jest 500 razy dłuższa niż czas trwania impulsu. Wywierają wpływ na zakończenia nerwów wegetatywnych co przejawia się zmienioną czynnością naczyń krwionośnych skóry oraz występowaniem podrażnień nerwów czuciowych skóry.

Czas zabiegu 5minut

D'ARSONVALIZACJA OGÓLNA:

ma działanie uspokajające
stosowana jest w : leczeniu bezsenności, przy stanach wyczerpania nerwowego, nerwicy wegetatywnej, świądzie.

D'ARSONVALIZACJA MIEJSCOWA:

(najczęściej wykonywana na twarzy) działanie kosmetyczne:

- elektryczny masaż twarzy
- dezynfekcja skóry (np. po mechanicznym oczyszczaniu skóry)
- łojotok twarzy (skóry owłosionej)
- pobudzenie ukrwienia (skóra ziemista)
- I stadium opryszczki
- makijaż permanentny ust
- łysienie plackowate
- łupież tłusty

PRZECIWSKAZANIA DO D'ARSONVALIZACJI:

a) ogólnej

- ciąża
- nadciśnienie
- obrzęki
- nadpobudliwość nerwowa
- choroby serca
- przerwana ciągłość skóry
- stany zapalne skóry
- gorączka
- astma
- metalowe implanty

b) miejscowej

- trądzik różowaty
- rozszerzone naczynka krwionośne
- stany alergiczne skóry
- ciąża
- stany zapalne i zakaźne skóry

GALVANIZACJA to zabieg elektroczniczy, w którym wykorzystuje się prąd stały. Podstawą działania prądu stałego są procesy fizykochemiczne zachodzące w tkankach. Przepływ prądu polega na ruchu jonów, zawartych w płynach tkankowych między elektrodami.

Dobrze przewodzi prąd pień mózgowo-rdzeniowy i krew (osocze), źle przewodzi tkanka tłuszczowa, kość i naskórek.

Anoda- elektroda dodatnia (+), ma działanie uspokajające (koi ból)

Katoda- elektroda ujemna(-), ma działanie pobudzające

Dawkę natężenia prądu ustala się w zależności od :
czasu trwania zabiegu
rodzaju i umiejscowienia zabiegu
odczuć klienta

PRZECIWSKAZANIA:

- ropne i zapalne stany skóry
- gorączka
- uprzednie stosowanie maści, kremów, balsamów
- choroby psychiczne
- zaburzenia czucia
- przerwana ciągłość skóry
- zaburzenia akcji serca
- choroby wewnętrzne
- choroby reumatyczne
- choroby dermatologiczne
- epilepsja
- ciąża
- nowotwory
- guzki niewiadomego pochodzenia
- metalowe części w organizmie
- czynna gruźlica płuc

WSKAZANIA DO GALVANIZACJI:

a)

- anodowej (+)
- po mechanicznym oczyszczaniu skóry
- rozszerzone pory
- rozszerzone naczynia krwionośne
- I stadium trądzika różowatego
- nerwice naczyniowe skóry

b)

- katodowej (-)
- skóra ziemista
- źle ukrwiona, nieodżywiona, niedotleniona.
- przed nałożeniem masek kosmetycznych przy odmrożeniach i odmrożynach

L A M P A - L U P A

Urządzenie zbudowane jest zarówno z lupy powiększającej, która pozwala nam na oglądanie skóry w powiększeniu (5 dpi) jak i lampy, doskonale oświetlającej oglądany obszar. Konstrukcja lampy umożliwia jej ustawienie w każdym położeniu a dzięki idealnemu kształtowi świetłówki, promienie padają równomiernie ze wszystkich stron. Światło lampy jest chłodne (w przeciwieństwie do zwykłych świetlówek), dzięki czemu powierzchnia oświetlana nie nagrzewa się.

B R U S H

Jest to urządzenie posiadające różne końcówki (szczoteczki), którymi wykonuje się masaż skóry. Stosowane do demakijażu oraz peelingu ciała. Różna wielkość szczotek umożliwia doskonale dotarcie do każdego miejsca. Istnieje możliwość zmiany kierunku oraz prędkości obrotów.

DZIAŁANIE:

- oczyszczające
- peelujące
- wygładzające
- ujędrniające

Przed i po zabiegu nie należy korzystać z solarium, sauny oraz nie wykonywać peelingu. Szczoteczki po zabiegu należy zdezynfekować i osuszyć.

W A P O Z O N

Urządzenie tworzące gorącą parę wodną, dodatkowo wyposażone jest w funkcję ozonu. Urządzenie posiada przezroczysty zbiornik na wodę o solidnym wykonaniu, oraz timer, którym można regulować czas pracy urządzenia. Aby opróżnić wazon z wody należy zdjąć plastikową osłonę, a następnie dolnym pokrętelem odkręcać do momentu poluzowania śruby. Zdjąć metalową obudowę i zbiornik z wodą. Do górnej części wazonu należy wlać wodę destylowaną do górnej linii poziomej, po uprzednim przekręceniu pokręteła.

Urządzenie stosowane w celu nawilżania skóry, rozpułchnienia naskórka, rozszerzenia porów, stymulacji wydzielania potu i łoju oraz dotlenienie skóry.

Przeciwskazaniem do stosowania wazonu jest cera z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi oraz trądzik różowaty.

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PILNOWAĆ POZIOMU WODY W ZBIORNIKU.

ZBYT NISKI POZIOM DOPROWADZI DO SPALENIA GRZAŁKI.

Czyszczenie pojemnika wazonu:

Odkręcić śrubę mocującą szklany pojemnik od wazonu zgodnie ze wskazówkami zegara oraz odchylić na bok metalową opaskę ze śrubą, jednocześnie trzymając szklany pojemnik (Uwaga! po pracy wazonu woda w zbiorniku jest gorąca, należy zachować szczególną ostrożność lub poczekać na ostygnięcie wody.) wyciągnąć i umyć środkiem myjącym (nie rysującym). Przed montażem bardzo dokładnie wypłukać (w czasie pracy nie może się pienić pozostawiony środek) i zamontować dokładnie w odwrotnej kolejności niż demontowaliśmy, zwracając uwagę aby szklany pojemnik oparł się na silikonowej uszczelce, a nie na metalowej części wokół boku uszczelki i dokręcić, aby nie było wycieku wody lub pary.

ULTRASONIC

Ultradźwięki są to fale będące poza granicą ludzkiej słyszalności. Energia wytwarzana ultradźwiękami przenika przez tkanki i mięśnie, przyczyniając się do uaktywnienia błony komórkowej. Wykorzystuje się je do zabiegów twarzy i ciała w celu ożywienia komórek, oczyszczania skóry, usuwania cellulitu oraz wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry.

PRZECIWSKAZANIA:

- nowotwory, guzki niewiadomego pochodzenia • gruźlica
- nerwica wegetatywna • choroba naczyń wieńcowych
- metalowe implanty • rozrusznik serca • stany zapalne
- zakrzepowe zapalenie żył • stany po terapii rentgenowskiej
- gorączka • ciąża

Głowicę należy przyłożyć do skóry (po nałożeniu ampułki) i przesuwać zgodnie z przebiegiem mięśni. Intensywność należy dostosować do odczuć klientki.

ULTRADŹWIĘKI

To system transportu substancji czynnych do głębokich warstw skóry. Urządzenie wykorzystuje fizyczne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych i w warstwie rogowej skóry, dzięki temu następuje otworzenie nowych dróg wprowadzania aktywnych preparatów bez konieczności użycia igieł. Bezigłowa Ultradźwięki to nieinwazyjny system do zwalczania cellulitu i redukcji zmarszczek, jest nowoczesną alternatywą do klasycznej mezoterapii.

Każda sesja terapeutyczna trwa około 15-20 minut. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty konieczne jest przeprowadzenie serii 8-10 zabiegów. Wyraźne korzyści można zaobserwować już po 5 lub 6 sesjach, jakkolwiek zależy to od stopnia nasilenia cellulitu.

Ultradźwięki jako terapia przeciwzmarszczkowa.

Pojawianie się zmarszczek to naturalny aspekt starzenia. W jego wyniku dochodzi do pogorszenia nawodnienia skóry i zmniejszenia produkcji włókien elastynowych i kolagenowych. Jednym z ważnych czynników jest również występowanie wolnych rodników. Ogólnie ujmując, zjawiska tego nie można zahamować, lecz jego przebieg daje się znacznie spowolnić. Jediną skuteczną metodą jest zastosowanie odpowiedniej ampułki przeciwzmarszczkowej w połączeniu z falami ultradźwiękowymi dzięki temu uzyskujemy efekt już po pierwszym zabiegu.

Schemat przykładowego zabiegu na kosmetykach MayStar:

1) Demakijaż twarzy mleczkiem do demakijażu z linii Sensitive.

2) Tonizacja skóry wodą termalną z linii Sensitive.

3) Na całą twarz, szyi, i dekolcie aplikujemy (omijając okolice oczu i ust) w zależności od potrzeb skóry następujące produkty, które zawierają w swoim składzie substancje aktywne czynne, które dzięki ultradźwiękom zostaną wprowadzone w głąb skóry:

Serum GOLD - do cery dojrzałej, ma działanie ujędrniające, regenerujące stymuluje produkcję kolagenu, ujędrnia skórę

Serum ENERGY - również do cery dojrzałej, stymuluje produkcję kolagenu, ujędrnia skórę

Serum VITAMINA C - do cery naczyniowej, rewitalizuje, rozświetla skórę, do cery szarej i ziemistej

Ampułki firmy MayStar stosowane przy zabiegach z wykorzystaniem urządzenia UltraSonic:



Dermaclean – ampulki dla skóry tłustej, problematycznej. Biokoncentrat z ekstraktów roślinnych o właściwościach oczyszczających. Niezastąpienie jako „terapia szokowa” dla skóry tłustej, łojotokowej z zaskórnikami. Reguluje pracę gruczołów łojowych.



Sensitive serum – skoncentrowane serum o właściwościach wzmacniających i uspokajających. Szczególnie polecane dla skóry wrażliwej i podrażnionej, suchej (np. po opalaniu, depilacji, reakcji na kosmetyk).



Skin Memory – wysoko skoncentrowane ampulki, oparte na kombinacji bioaktywnych peptydów, glikanów oraz ceramidów. Stworzone specjalnie po to, aby aktywować i regulować wszystkie naturalne mechanizmy odnowy skóry. Działają naprawczo, ochronnie, odnawiająco na skórę, a także przeciwzmarszczkowo - do cery dojrzałej, działanie regenerujące.

ELEKTROKOAGULACJA

Elektrokoagulacja polega na ścięciu białka tkanek poprzez termiczne jego uszkodzenie. Wskazaniami do elektrokoagulacji są np.: brodawki wirusowe czyli kurzajki, płaskie brodawki łojotokowe, prosaki, torbiele łojowe czyli kaszaki, rozszerzone naczynia krwionośne na twarzy i nogach, naczyniaki gwiaździste, włókniaki, usuwanie zbędnego owłosienia.

O ZABIEGU:

- zabieg jest wykonywany przy użyciu elektrody - igły
- zabieg jest bolesny, dlatego często stosuje się znieczulenie miejscowe.
- bezpośrednio po zabiegu może wystąpić obrzęk, rumień, stwardnienie, zasinienie, ból
- objawy niepożądane, występujące rzadko, to przebarwienia, odbarwienia, blizny zanikowe lub przeroste (zależnie od wielkości zmian usuwanych, np. w przypadku włókniaków bardzo małych często występujących na szyi, w okolicy pach nie pozostają żadne ślady).
- strupki, które pojawiają się po zabiegu goją się w ciągu kilku dni.

PRZECIWWSKAZANIAMI DO ZABIEGU SĄ:

- rozrusznik serca • zaburzenia krzepnięcia • zaburzenia krążenia
- cukrzyca (trudności w gojeniu) • ciąża

GŁOWICA CIEPŁO – ZIMNO

Urządzenie posiada dwie funkcje.

Pierwszą jest chłodzenie, które stosowane jest w celu łagodzenia podrażnień i zaczerwienień skórnych. Głównie po zabiegu oczyszczania, przy rozszerzonych porach i naczyniach krwionośnych, przy trądziku różowatym oraz nerwicach naczyniowych skóry. Ma działanie kojące i uspokajające.

Drugą funkcją jest rozgrzewanie, stosowane przy skórze szarej, ziemistej, źle odżywionej w celu ukrwienia i dotlenienia oraz pobudzenia skóry. Można również stosować przed nałożeniem masek kosmetycznych, aby skóra szybciej wchłaniała substancje odżywcze oraz przy odmrożeniach i odmrozinach. Głowicę należy przyłożyć do powierzchni skóry i przesuwać zgodnie z przebiegiem mięśni.

Zabiegi można wykonywać na całej powierzchni ciała omijając powieki.



S P R A Y

Urządzenie składa się z dwóch pojemniczków z rozpylaczem oraz wężyka. Wężyk podłączony jest do urządzenia, wytwarzającego podciśnienie, które rozpyla roztwór przez jeden z pojemniczków. Należy napełnić pojemniczek roztworem np. tonikiem i podłączyć go do urządzenia a następnie nacisnąć start, aby rozpocząć pracę, rozpylanie następuje po zatknięciu palcem otworu wylotowego pojemnika. Urządzenie stosowane jest w celu tonizacji skóry podczas zabiegu.

PODZAS PRACY URZĄDZENIA MUSI BYĆ WYŁĄCZONA FUNKCJA MIKRODERMABRAZJI, A WĘŻYK PODŁĄCZONY W WYJŚCIE SPRAY

L A M P A W O O D A

Jest to urządzenie emitujące długofalowe promieniowanie nadfioletowe. Składa się ona z czterech żarówek (filtr Wooda zbudowany z krzemianu baru z dodatkiem 9% tlenku niklu, którego pasmo przepustowości wynosi od 320 do 400 nm z maksimum w 365 nm) oraz lampy powiększającej. Daje ono możliwość dokładnego oglądania skóry.

Stosowana w dermatologii do szybkiej diagnostyki grzybicy, gdyż zmienione ogniska w świetle lampy w zaciemnionym miejscu silnie fluoryzują. W zależności od rodzaju skóry oraz schorzeń występują różnobarwne odbicia.

skóra normalna - odbicie w kolorze niebiesko – fioletowym
skóra sucha (odwodniona) - odbicie blade fioletowe
skóra dobrze nawilżona – odbicie ciemno fioletowe

Mimo, że obsługa lampy jest prosta i nie wymaga specjalnego przeszkolenia, należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, aby wykonać badanie prawidłowo i zminimalizować ryzyko błędnej diagnozy:

- przed użyciem lampa powinna się nagrzać przez około 1 minutę,
- badanie należy przeprowadzać w bardzo ciemnym pomieszczeniu,
- osoba wykonująca diagnozę powinna być zaadaptowana do widzenia w ciemności, aby wyraźnie widzieć kontrast na skórze oraz powinna dostosować swój ubiór tak, by nie dochodziło do odbicia od niego światła lampy; biały fartuch odbija promieniowanie UV dając jasno niebieskie światło, które może padać na skórę pacjenta, powodując mylną diagnozę,
- wskazana odległość źródła światła od badanej części skóry wynosi około 11 - 15 cm,
- przed zabiegiem nie powinno się używać kosmetyków, miejscowych leków, a nawet myć skóry mydłem, gdyż niektóre składniki ww. produktów mogą świecić, dając niewłaściwą diagnozę,
- w przypadku osób z ciemną karnacją postawienie trafnej diagnozy jest czasami utrudnione z powodu większego stężenia melaniny.

V A C C U M

Urządzenie składa się z trzech szklanych ssawek z otworami bocznymi oraz jednego wężyka. Urządzenie służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń skórnych (zaskórników otwartych), poprawienia ukrwienia oraz masażu limfatycznego, dzięki któremu usuwana jest limfa i odprowadzana do najbliższych węzłów limfatycznych. Likwidowane są sińce i worki pod oczami a skóra nabiera zdrowego kolorytu.

Przed włączeniem urządzenia należy przycisnąć start na panelu. Do wężyka należy podłączyć ssawkę, przyłożyć palec do otworu bocznego i umieścić ją przy skórze. Dopiero po zatknięciu otworu zostaje skóra zasysana. Zabieg należy wykonać na określonej partii ciała. Przed zabiegiem należy wykonać próbę na ręce.