

INSTRUKCJA OBSŁUGI

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 3022 i 3023




FUNKCJE WAPOZONU:

1. Otwiera pory w celu dogłębnego wyczyszczenia.
2. Para pomaga skórze w wydzieleniu toksyn
3. Działa zmiękczająco na skórę
4. Podwyższa cyrkulację krwi.
5. Przyspiesza metabolizm komórek.
6. Nawilża i odświeża skórę.
7. Znacznie polepsza rezultaty masażu

Wapozony z tej serii wykonane są z trwałych nierdzewnych materiałów stalowych, podwójnie izolowanej bazy i stabilnej podstawy zapewniającej bezpieczeństwo podczas pracy z wysokimi temperaturami. Urządzenie posiada domyślne ustawienia czasowe, trójstopniową regulację rozpylania i automatyczny kontroler poziomu wody – alarm sygnalizujący za wysoki bądź za niski poziom wody. Dzięki wyświetlaczowi LCD użytkownik może w każdej chwili zobaczyć parametry procesu.

PANEL:

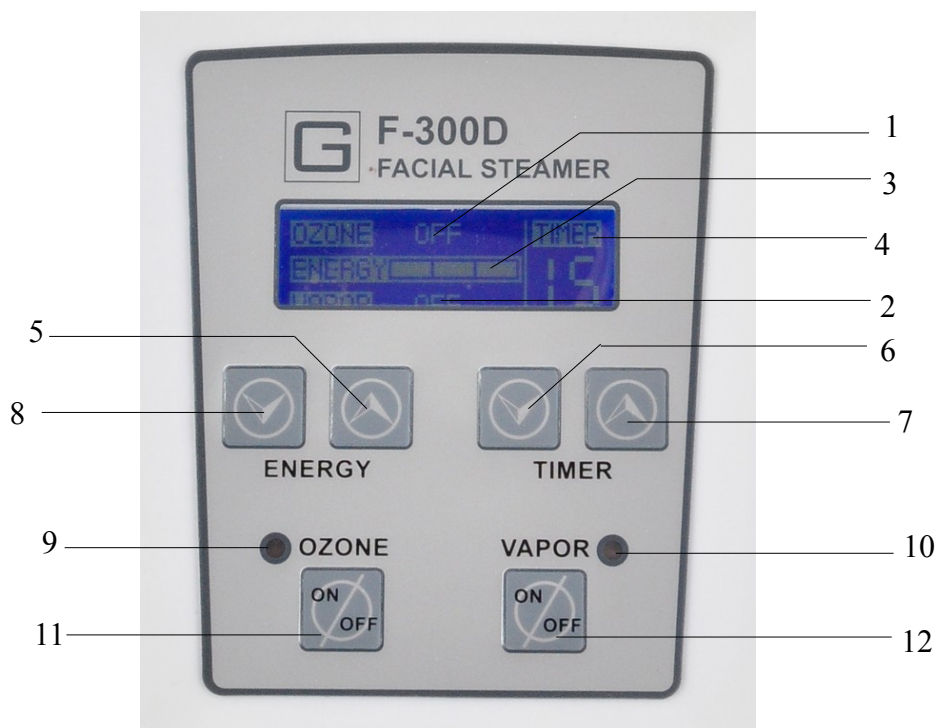

1. Wyświetlacz OZONE.
2. Wyświetlacz VAPOR.
3. Wskaźnik energii.
4. Wyświetlacz czasu.
5. Zwiększanie energii.
6. Zmniejszanie czasu.
7. Zwiększanie czasu.
8. Zmniejszanie energii.
9. Lampka kontrolna trybu OZONE
10. Lampka kontrolna trybu VAPOR.
11. Włącznik ON/OFF trybu OZONE.
12. Włącznik ON/OFF trybu VAPOR.



Metody pracy z urządzeniem:

1. Jeśli chcesz wyjąć kubek, odkręć napełniacz po czym wciśnij mały szary przycisk (blokada). Jeśli chcesz dolać wody do kubka, odkręć korek i powoli wlewaj wodę. Upewnij się że nie przekraczasz maksymalnego poziomu.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3. Urządzenie wykona auto-test i przejdzie w tryb gotowości.
4. Ustaw czas i energię.
5. Wciśnij przycisk „ON/OFF OZONE” by włączyć tryb ozonu w momencie kiedy woda zacznie się gotować. Urządzenie zacznie rozpylać ozon. W tym momencie para jest w „normalnym” trybie i może być wykorzystana do zabiegu twarzy.
6. Aby uruchomić aromatoterapię należy wlać olejek do zbiornika.

UWAGA:

1. Urządzenie posiada funkcję auto-testu, jeśli woda jest poniżej minimalnego poziomu wapozon zatrzyma pracę i wyda podwójny sygnał dźwiękowy.
2. Zanim para zacznie być naprowadzana na twarz, należy sprawdzić czy urządzenie prawidłowo wydziela parę.
3. Proszę trzymać urządzenie z dala od urządzeń o wysokich częstotliwościach jak np. urządzenie high frequency. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub pogorszenia jakości i wydajności pracy. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy wyłączyć urządzenie, odczekać 15 sekund i na nowo je uruchomić. Jeśli ta procedura nie pomoże należy skontaktować się z serwisem.
4. Jeśli pokrywa pojemnika na olejki nie została dobrze przykręcona może to spowodować przecieki. Nie należy też przesadzić ze zbyt mocnym przykręceniem.
5. Nie należy wyciągać napełniacza przed dolewaniem wody.
6. Kubek może zostać wyciągnięty dopiero po wyjęciu napełniacza. Kubek powinien być czyszczony codziennie.

SUGESTIE:

Rodzaje skóry, wskazana odległość dyszy od twarzy i zalecany czas zabiegu:

- przetłuszczająca się, słaba cyrkulacja krwi: dystans 35-40 cm przez około 15 min
- normalna: 34-40cm przez 10 min
- wrażliwa i sucha: 40-45 cm przez 5 min
- rozszerzone naczynka: 40 cm przez 5 min

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Koniecznym warunkiem pracy z urządzeniem jest dobre uziemienie instalacji elektrycznej.
2. Nie należy rozpylać pary od górnej części twarzy, może to spowodować oparzenia.
3. Nie należy wlewać przegrzanej wody (powyżej 50 stopni C), może uszkodzić urządzenie.
4. Nie należy wystawiać pracującego urządzenia na promienie słoneczne.
5. Jeśli urządzenie nie będzie pracowało poprawnie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Nigdy samodzielnie nie naprawiaj urządzenia.
6. Używaj tylko i wyłącznie czystej wody. Nie należy wlewać do zbiorników różnego rodzaju olejów, płynów zielarskich i tym podobnych materiałów. W przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia dyszy bądź całego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zasilanie: 220-240V, 50~60 Hz

Moc: 800W

URZĄDZENIE ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwięki to mechanicznie wytwarzane wibracjami fale o częstotliwości ponad 20,000 Hz. Występują trzy główne funkcje ultradźwięków:

1. Mechaniczna:

Ultradźwięki to bardziej energia niż sam dźwięk. Kiedy oddziałują na ludzkie ciało, ruch komórek przyspiesza; poza tym spełnia funkcje masażu, zmienia energię komórek, wytwarza ruch komórek, obraca protoplazmę w granulki, aktywuje szerzenie się błony przepuszczalnej, polepsza cyrkulację krwiobiegu i limfy, podwyższa przepuszczalność komórek, podnosi metabolizm tkanek i możliwości regeneracyjne. Ponadto mechaniczne działanie ultradźwięków zmiękcza tkanki, zwiększa penetrację, polepsza metabolizm i aktywuje system nerwowy i komórkowy.

2. Ciepła

Ta funkcja jest drugą jeśli chodzi o leczenie w stosunku do funkcji mechanicznej. Wytwarza wewnętrzne ciepło, które jest przenoszone przez krwiobieg. Generalnie funkcja ta przyspiesza krwiobieg, zmienia metabolizm, polepsza cyrkulację krwi, zmniejsza pobudliwość nerwów oraz ma właściwości łagodzące.

3. Chemiczna:

Funkcja ta jest głównie spowodowana przez polimeryzację i depolimeryzację. Polimeryzacja to procedura polegająca na łączeniu podobnych molekuł w jedną większą. Mała dawka ultradźwięków może polepszyć wzrost kompleksu białek wewnątrz komórek. Depolimeryzacja to procedura, w której lepkość większych molekuł zmniejsza się razem z ich wagą. Generalnie funkcja chemiczna przyspiesza metabolizm, wzmacnia katalizę (?) przez co wartość pH w tkankach zmienia się w alkaliczną. Te trzy funkcje zapewniają masaż komórek w tkankach lokalnych, podwyższenie temperatury taksonomii (??) tkanek, wzrost aktywności komórek, polepszenie cyrkulacji

krwii, zmiękczenie tkanek, przyspieszenie reakcji chemicznych.


PRACA Z URZĄDZENIEM F-312 ULTRASONIC:

A: Podłącz wtyczki od elektrod do odpowiedniego gniazda w urządzeniu i uruchom urządzenie.

B: Włącz urządzenie przyciskiem POWER.

C: Ustaw rodzaj fali, energię i czas (domyślny ustawienie na małą elektrodę: fala postępową, energia na 5, czas 15 minut).

D: Wciśnij przycisk START/PAUSE by uruchomić / zatrzymać proces zabiegu

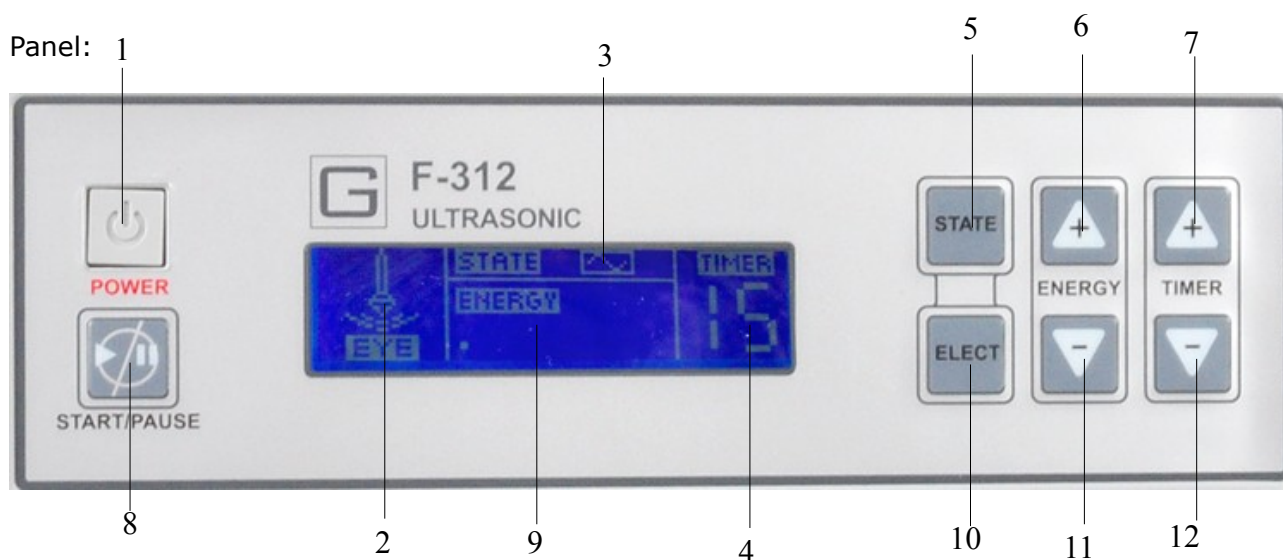

1. Przycisk zasilania.
2. Wskaźnik elektrody
3. Wskaźnik fali
4. Czas
5. Przycisk przełączania fali
6. Przycisk zwiększania energii „+”
7. Przycisk zwiększania czasu „+”
8. Przycisk startu / pauzowania procesu
9. Wskaźnik energii
10. Przycisk przełączania między elektrodami
11. Przycisk zmniejszania energii „-”
12. Przycisk zmniejszania czasu „-”

Zabieg z użyciem ultradźwięków:

1. Do demakijażu stosujemy **mleczko SYIS**. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera mocznik o działaniu silnie zmiękczącym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji w głąb skóry.
2. Nakładamy peeling enzymatyczny SYIS, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową **chustą zabiegową**
4. Tonizujemy skórę **tonikiem antybakteryjnym SYIS**, aby przywrócić jej naturalne pH. Tonik zawiera kwas mlekowy, mający działanie złuszczące i antybakteryjne.
5. Za pomocą ultradźwięków wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne.
6. W urządzeniu wstępują dwie fale do wyboru:



jest falą delikatną służy do wtlaczania substancji w głąb skóry przy
1 przeciwmarszczkowych, łagodzących, uspokajających skórę

przerywana- jest macną falą służącą do wtlaczania substancji aktywnych w głąb skóry. Dodatkowo fala ta powoduje intensywny mikromasaż dzięki temu możemy stosować ją do zabiegów liftujących jak i do zabiegów na ciało.

7. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną **ampulkę SYIS**. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – **żel chłodzący ACTIV AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%**

Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .

WZMACNIAJĄCA AMPUŁKA DO CERY NACZYNIOWEJ

Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne. Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejkiwki cynamonowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.

AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA

Zawiera hydrolizowane proteiny mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.

8. Aby wyciszyć i ukoić skórę wykonujemy masaż na zimno z użyciem głowicy cold-warm, następnie tonizujemy skórę.
9. Na skórę aplikujemy maskę algową SYIS połączoną z aktywatorem do alg SYIS
10. Nakładamy **krem pod oczy SYIS**
11. Połączenie kwasu mlekowego i tlenku cynku gwarantuje szybki efekt napinający i ujędrniający. Dzięki zawartości tlenku cynku krem doskonale likwiduje oznaki zmęczenia, usprawnia mikrokrażenie, obrzęki i zasinienia wokół oczu.
12. Na zakończenie zabiegu aplikujemy **krem do cery naczyniowej SYIS zawierający** witaminę E, olej migdałowy o działaniu nawilżającym, panthenol o właściwościach łagodzących, BHA – właściwości delikatnie złuszczone.
13. Na koniec zabiegu dla wyrównania kolorytu aplikujemy krem korygujący kamuflaż SYIS

Częstotliwość zabiegu:

- Aby efekty były widoczne potrzebne jest wykonanie zabiegu, w serii około 8-10 zabiegów,
- Efekty widoczne są już po 5-6 zabiegach,
- Czas trwania zabiegu wynosi około 15-20 minut.

WSKAZANIA

- Zmarszczki,
- Cera dojrzała,
- Rozstępy,
- Blizny,
- Cellulit,
- Skóra szara, zmęczona.

PRZECIWSKAZANIA:


- Cięża,
- Metalowe elementy w organizmie,
- Choroby serca,
- Rozrusznik serca,
- Stany zapalne wirusowe, grzybicze.

UWAGI:

1. Elektrody powinny być czyszczone po każdym ich użyciu, najlepiej dezynfekować je alkoholem.
2. Nie przeprowadzać zabiegu dłużej niż 15 minut. Dłuższy zabieg może niekorzystnie wypłynąć na skórę.
3. Jeśli urządzenie nie uruchamia się, sprawdź połączenie przewodu zasilającego między urządzeniem a gniazdkiem. Sprawdź bezpieczniki, jeśli jest spalony należy go wymienić na taki sam tj. 250V/4A. Jeśli nadal urządzenie nie reaguje należy skontaktować się z serwisem.
4. Nie wkładaj elektrod do wody.

URZĄDZENIE SKIN SCRUBBER F-311

Peeling kawitacyjny:

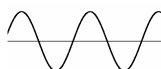

Peeling kawitacyjny jest to oczyszczanie skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowej. Pozwala on nie tylko na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, ale również na pozbycie się zaskórników. Oczyszczanie i złuszczenie naskórka następuje za pomocą zjawiska kawitacji, które zachodzi, gdy wilgotną skórę potraktuje się falami ultradźwiękowymi.

METODYKA ZABIEGU SYIS:

1. Do demakijażu wykorzystujemy **mleczko SYIS**. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera również mocznik o działaniu silnie zmiękczającym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry.
2. Nakładamy **peeling enzymatyczny SYIS**, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową **chustą zabiegową**.
4. Tonizujemy skórę **tonikiem antybakteryjnym SYIS**, aby przywrócić jej naturalne pH .
Intensywność zabiegu ustawiamy do odczuć klienta, pamiętając aby skóra była cały czas zwilżana,
Należy poinformować klienta o odczuciach tj. delikatne mrowienie, pischczenie w uszach, metaliczny posmak w ustach
Szpatułkę trzymamy pod kątem 45stopni
Czas zabiegu nie powinien przekroczyć 15-20 minut,

Wskazania:

- usuwa zanieczyszczenia skóry
- bezboleśnie i dokładnie czyści skórę twarzy, szyi i dekoltu
- usuwa martwe komórki skóry
- uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych
- regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne
- przyspiesza mikrokążenie skóry
- pomaga w leczeniu trądziku poprzez swoje działanie sterylizujące

Przeciwwskazania:

- Cięża,
- Rozrusznik serca,
- Nowotwory, guzki niewiadomego pochodzenia,
- Zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze,
- Przerwana ciągłość skóry,

- Przy aparacie na zębach, pytać o odczucia.

PRACA Z URZĄDZENIEM F-311

A: Dokładnie podłącz przewód zasilający do gniazdka oraz przewód szpatuły do urządzenia.

B: Włącz główny przycisk zasilający POWER na przednim panelu.

C: Ustaw falę wyjściową, energię i czas (domyślne ustawienie: fala ciągła, energia na maksymalnej wartości, czas 15 minut).

D: Wciśnij przycisk START/PAUSE.

PANEL:



1. Przycisk zasilania głównego
2. Przycisk START/PAUZA
3. Wskaźnik pracy szpatuły
4. Czas
5. Wybór fali
6. Przycisk zwiększania/zmniejszania energii
7. Przycisk zwiększania/zmniejszania czasu

METODYKA ZABIEGU SYIS:

1. Do demakijażu wykorzystujemy **mleczko SYIS**. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera również moczniak o działaniu silnie zmiękczającym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry.
2. Nakładamy **peeling enzymatyczny SYIS**, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową **chustą zabiegową**.
4. Tonizujemy skórę **tonikiem antybakteryjnym SYIS**, aby przywrócić jej naturalne pH.
5. Za pomocą sonoforezy wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną **ampułkę SYIS**. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – **żel chłodzący ACTIV AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%**
Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .



WZMACNIAJĄCA AMPUŁKA DO CERY NACZYNIOWEJ

Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne.

Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejкови cymentonowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.



AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA

Zawiera hydrolizowane proteiny mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.



Przeciwwskazania:

- Ciąża,
- Rozrusznik serca,
- Nowotwory, guzki niewiadomego pochodzenia,
- Zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze,
- Przerwana ciągłość skóry,
- Przy aparacie na zębach, pytać o odczucia.

UWAGI:


1. Czas uruchomienia urządzenia to około 0,5 sekundy. Miganie ikonki szpatuły może oznaczać słaby kontakt szpatuły z urządzeniem.
2. Nie pozostawiaj włączonej elektrody za długo, może dojść do jej uszkodzenia.
3. Jeśli olejek wykorzystywany przy zabiegu nie zwilża skóry wystarczająco, należy nałożyć jeszcze raz
4. Pamiętaj o poprawnym podłączeniu szpatuły do urządzenia.
5. Podczas zabiegu unikaj wody lub innych płynów mogących doprowadzić do korozji.
6. Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie skontaktuj się z serwisem. Nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.

URZĄDZENIE GALVANIC F-313A

Zabieg galwaniczny jest pomocny przy odżywianiu i oczyszczaniu skóry. Składniki odżywcze są wprowadzane w głąb skóry. Podczas oczyszczania wprowadzany jest roztwór alkaliczny dzięki czemu skóra staje się gładka, równomiernie rozkłada substancje wydzielające się ze skóry.

Elektroda jonów pozytywnych mogą doprowadzać roztwór kwasowy w skórę, który wzmacnia tkanki, odpręża układ nerwowy oraz zmniejsza zapotrzebowanie krwi. Urządzenie jest głównie wykorzystywane po zabiegu odmładzającym by złagodzić podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz uchronić skórę przed zapaleniem. Elektroda jonów negatywnych może wprowadzać w skórę roztwór alkaliczny by zmiękczyć tkanki skóry, pobudzić układ nerwowy i zwiększyć zapotrzebowanie krwi. Używane głównie na skórę tłustą i starszą.

PANEL:

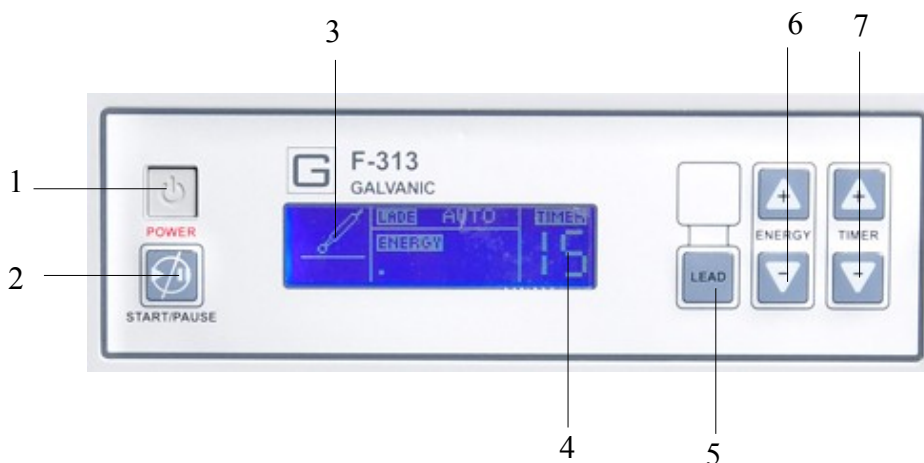

1. Zasilanie
2. START/PAUZA
3. Kontrolka działania głowicy
4. Czas
5. Przełącznik głowicy
6. Zwiększanie/zmniejszanie energii
7. Zwiększanie/zmniejszanie czasu

PRACA Z URZĄDZENIEM:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć wszystkie instrumenty. Osoba poddana zabiegowi powinna chwycić metalową końcówkę.
2. Część ciała poddana zabiegowi musi być czysta i sucha przed wprowadzeniem

składników odżywczych. Wciśnij przycisk (+R). W tym momencie rolka ma jony pozytywne a metalowa końcówka ma negatywne jony. Wykonujący zabieg równomiernie spryskuje skórę płynem odżywczym po czym okrywa głowicę kawałkiem nasączonej płynem kwasowym bawełny. Jeśli chcemy wykonać zabieg wyprowadzania, należy wcisnąć przycisk w pozycję (-G). Elektroda emanuje jonami negatywnymi a metalowa końcówka pozytywnymi. Przed zabiegiem nasącz kawałek bawełny płynem alkalicznym i owiń nim końcówkę elektrody.

3. Wciśnij przycisk „IONOS”, wybierz metodę (-G) lub (+R) a następnie obróć pokrętkę „I/Energy” do minimum. Dotknij elektrodą część ciała poddaną zabiegowi i powoli podkręcaj „I/Energy” do żądanej wartości. Powoli przesuwaj elektrodę po miejscu przeznaczonym na zabieg.

UWAGI:

1. Po zabiegu elektrody i metalowa końcówka muszą być oczyszczone i suche aby zapobiec ich uszkodzeniu.
2. Kiedy elektroda emanuje jonami negatywnymi odczucia podczas zabiegu będą intensywniej odbierane niż przy zabiegu jonami pozytywnymi.
3. Osoba, która zostanie poddana zabiegowi musi przed zabiegiem zdjąć biżuterię.
4. Kobiety w ciąży oraz osoby, które cierpią na zapalenie skóry, mają zbyt wrażliwą skórę bądź uszkodzoną skórę nie mogą poddać się zabiegowi tym urządzeniem.
5. Płyn kosmetyczny musi być dobrany pod kątem jonów. Podczas zabiegu jonami pozytywnymi należy użyć płynu kwasowego(+) natomiast płyn alkaliczny należy stosować przy zabiegu jonami negatywnymi(-). Proszę użyć papierka PH do sprawdzenia płynu.
6. Podczas używania urządzenia nie można stykać elektrody z metalową końcówką. W razie takiego zdarzenia urządzenie automatycznie odetnie dopływ prądu elektrodom. W tym momencie należy przekręcić pokrętkę „I/Energy” do minimum a następnie do wartości wyższej. W czasie wyłączenia urządzenia najpierw należy wyłączyć „I/Energy” przekręcając do minimum a dopiero potem wcisnąć przycisk „POWER”.
7. Jeśli po podłączeniu urządzenia świeci się tylko lampka POWER, należy przekręcić pokrętkę „I/Energy” do min. a następnie zrestartować urządzenie.

URZĄDZENIE DIAMOND DERMABRASION F-319A

Mikrodermabrazja to zabieg, podczas którego za pomocą ścierających diamentowych końcówek i pompy ssącej złuszczamy powierzchniowe warstwy naskórka.

PANEL:



1. Przycisk zasilania
2. START/PAUZA
3. Kontrolka działania głowicy

4. Czas
5. Zwiększanie/zmniejszanie energii
6. Zwiększanie/zmniejszanie czasu

Urządzenie posiada 9 diamentowych głowic:

- 3 głowice dla różnych rodzajów skóry
- 2 głowice na oczy i zmarszczki
- 4 głowice do ciała

Zabieg mikrodermabrazji krok po kroku:

- Przygotować skórę do zabiegu,
- Włączyć urządzenie przyciskiem 1
- Przyciskami 6 ustawić żądany czas zabiegu (czas 20-25min)
- Przyciskami 5 ustawić żadaną siłę ssącą
- Przyciskiem 2 rozpocząć zabieg

Zabieg mikrodermabrazji:

1. Do demakijażu stosujemy **mleczko SYIS**. Preparat zawiera olej z pestek winogron o działaniu kojącym i ujędrniającym. Mleczko zawiera mocznik o działaniu silnie zmiękczającym, zapewniającym lepsze wchłanianie substancji w głąb skóry.
2. Nakładamy peeling enzymatyczny SYIS, na którym wykonujemy masaż. Enzymem rozpuszczającym komórki jest Bromelina pozyskiwana z owoców ananasa. Owoc dodatkowo zawiera witaminę C mającą kluczową rolę w likwidowaniu przebarwień.
3. Zmywamy resztki peelingu jednorazową **chustą zabiegową**
4. Tonizujemy skórę **tonikiem antybakteryjnym SYIS**, aby przywrócić jej naturalne pH . Tonik zawiera kwas mlekowy, mający działanie złuszczące i antybakteryjne.
5. Wykonujemy zabieg mikrodermabrazji 20-25 minut
6. Po zabiegu tonizujemy skórę **tonikiem antybakteryjnym SYIS**
7. Za pomocą mezoterapii bezigłowej lub sonoforezy wykonujemy zabieg mający na celu wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz podniesienie odporności skóry na czynniki fizyczne. Falami ultradźwiękowymi wprowadzamy w głębokie warstwy skóry wybraną **ampułkę SYIS**. Zabieg przeprowadzamy z użyciem substancji sprzęgającej – **żel chłodzący ACTIV**

AMPUŁKA COLLAGEN pure 100%

Ampułka kolagenowa zawierająca rozpuszczony kolagen zatrzymujący wodę w skórze .

WZMACNIAJĄCA AMPUŁKA DO CERY NACZYNIOWEJ

Zawiera wyciąg z perełkowca japońskiego bogatego w rutynę uszczelniającą naczynia krwionośne.

Olej rycynowy wzmacnia suchą skórę, a zawarty w ampułce retinol oraz witamina E zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Dzięki olejkiwki cytrynowemu ampułka ma działanie antybakteryjne.

AMPUŁKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA

Zawiera hydrolizowane proteiny mleczne, przypominające naturalne NMF (naturalny czynnik nawilżający). Ampułka ma działanie liftujące.

8. Aby wyciszyć i ukoić skórę wykonujemy masaż na zimno z użyciem głowicy cold-warm, następnie tonizujemy skórę.
9. Na skórę aplikujemy maskę algową SYIS połączoną z aktywatorem do alg SYIS
10. Nakładamy **krem pod oczy SYIS**
11. Połączenie kwasu mlekowego i tlenku cynku gwarantuje szybki efekt napinający i ujędrniający. Dzięki zawartości tlenku cynku krem doskonale likwiduje oznaki zmęczenia, usprawnia mikrokrażenie, obrzęki i zasinienia wokół oczu.
12. Na zakończenie zabiegu aplikujemy **krem do cery naczyniowej SYIS zawierający** witaminę E, olej migdałowy o działaniu nawilżającym, panthenol o

właściwościach łagodzących, BHA – właściwości delikatnie złuszczące.

13. Na koniec zabiegu dla wyrównania kolorytu aplikujemy krem korygujący kamuflaż SYIS

Częstotliwość zabiegu:

- w serii wykonujemy średnio od 5 – 10 zabiegów,
- w przypadku terapii przeciwtrądzikowej w odstępach około 3 tygodnie,
- w terapii przeciwzmarszczkowej w odstępach około 10-15 dni,
- w celu podtrzymania efektów zabieg powtarzamy co około 5 miesięcy.

ZALECENIA PO ZABIEGU

Unikać słońca, solarium – do około 3 tygodni po zabiegu,

Stosować filtry UV >30,

Intensywnie nawilżać skórę,

Unikać sauny, basenu do 5 dni po zabiegu,

Pić dużo wody mineralnej, niegazowanej,


URZĄDZENIE HIGH FREQUENCY F-314A

Urządzenie generuje prąd o wysokiej prędkości wibrującej, który przekształca się w energię cieplną zabijającą bakterie. Wysoka prędkość wibracji nie powoduje skurczów mięśni.

FUNKCJE:

1. Przyspiesza cyrkulację krwi.
2. Stymuluje aktywność gruczołów.
3. Pomaga skórze w czynnościach wydzielających i absorbujących.
4. Wzmaga metabolizm.
5. Zabija bakterie.
6. Generuje energię cieplną wewnątrz komórek skóry.
7. Pomaga kremom dogłębnie wnikać w skórę.

PANEL:

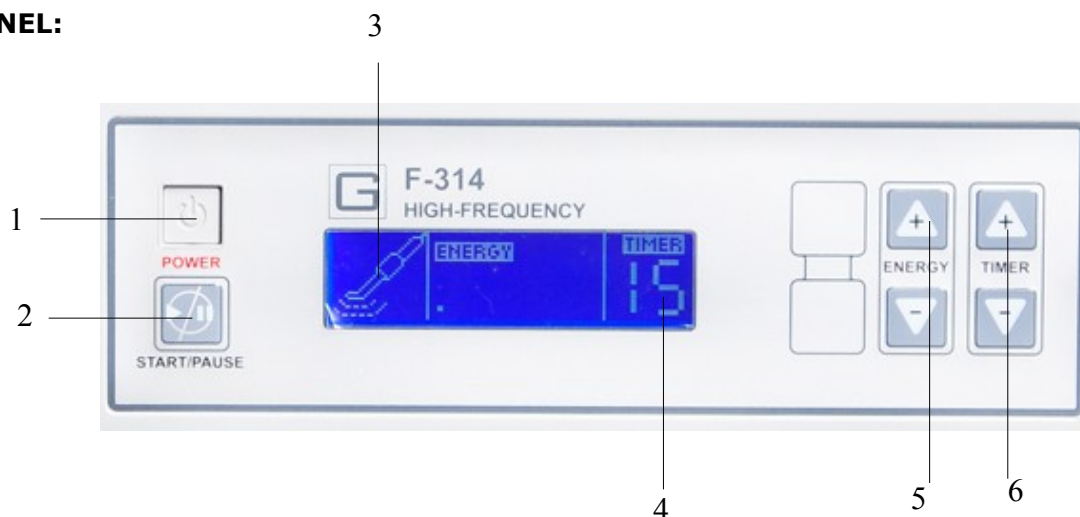

1. Przycisk zasilania
2. START/PAUZA
3. Wskaźnik pracy głowicy
4. Czas
5. Zwiększanie/zmniejszanie energii
6. Zwiększanie/zmniejszanie czasu

PRACA Z URZĄDZENIEM:

Najpierw wybierz szklaną elektrodę i włóż ją w uchwyt, po czym podłącz do urządzenia. Rodzaje i przeznaczenie elektrod:

- elektroda w kształcie grzybka – duże obszary skóry np. twarz, czoło, plecy itp.
- elektroda w kształcie łyżki – średniej wielkości obszary skóry np. podbródek
- elektroda z końcówką w kształcie kropki – małe obszary skóry np. nos itp.
- elektroda prosta – wykorzystywana do zabiegów pośrednich

1. Kosmetyczka chwyci rękojęść z włożoną elektrodą (nie należy dotykać szkła elektrody rękami lub metalowymi częściami) i zeruje wartość energii przyciskami 7
2. Wciśnij przycisk 1. Dotknij część ciała, która ma być poddana zabiegowi szklaną elektrodą i powoli zwiększaj intensywność przekręcając pokrętkę do momentu aż osoba poczuje lekkie mrowienie spowodowane wydzielanymi prądami. Jeśli twarz pokryta jest kremem lub maską przesuń elektrodę z dołu do góry zaczynając od szyi, powoli przesuając w stronę podbródka, twarzy, policzków, nosa i czoła. W trakcie zabiegu należy powoli zwiększać energię do stosownej intensywności.
3. Kiedy tkanka skóry zacznie generować energię cieplną zastosowanie zabiegu pomoże odprężyć skórę i zabić bakterie.
4. Po zabiegu powoli zmniejszaj intensywność energii do minimum, wyłącz urządzenie i zdejmij szklaną elektrodę z twarzy osoby poddającej się zabiegowi.

UŻYCIE POŚREDNIE:


Najpierw niech osoba poddająca się zabiegowi złapie prostą elektrodę szklaną, włączy urządzenie i stopniowo zwiększy intensywność do żądanej wartości. Następnie kosmetyczka masuje część ciała. W całym procesie kosmetyczka nie dotyka elektrody a kiedy zabieg dobiegnie końca kosmetyczka najpierw wyłącza urządzenie a potem odbiera elektrodę od osoby.

UWAGI:

1. Przed zabiegiem osoby muszą zdjąć biżuterię lub inne metalowe przedmioty.
2. Kobiety w ciąży i osoby z zaburzeniami rytmu serca nie mogą przejść zabiegu tym urządzeniem.
3. Kremy lub maski używane podczas zabiegu nie mogą zawierać w swoim składzie spirytusu. Jakiegokolwiek płyny zawierające spirytus mogą być wykorzystane po zabiegu.
4. Nie przykładaj elektrod do oka.

URZĄDZENIE ROTARY BRUSH F-315A

Urządzenie pozwala dokładnie oczyścić i wymasować skórę.

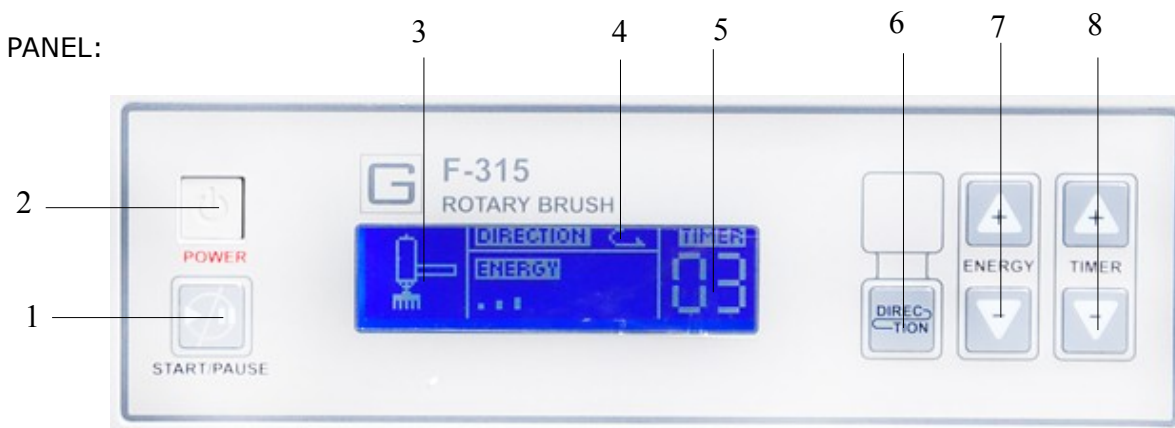

1. START/PAUZA
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik pracy głowicy
4. Kierunek obrotów
5. Czas
6. Przycisk zmiany kierunku obrotowego
7. Zwiększanie/zmniejszanie energii
8. Zwiększanie/zmniejszanie czasu

1. Podłącz przewód szczotki do urządzenia.
2. Wybierz odpowiednią końcówkę szczotki (dostępnych 5 różnych końcówek)
3. Włącz urządzenie przyciskiem 1
4. Przyciskiem 6 wybierz kierunek obrotów
5. Przyciskami 7 wybierz energię
6. Przyciskami 8 wybierz czas zabiegu
7. Przyciskiem 1 rozpocznij pracę.

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy końcówki szczotek zostały poprawnie zamocowane w głowicy.
2. Przed zabiegiem sprawdź poprawność pracy obrotów; w momencie rozpoczęcia zabiegu obroty powinny być niskie.
3. Po pracy umyj końcówki, wysterylizuj i trzymaj w suchym miejscu.
4. Urządzenie nie może pracować zbyt długo. W przeciwnym wypadku przegrzeje się.
5. Nie należy zatrzymywać ręką obracających się końcówek.

GWARANCJA:

Warunki gwarancji:

1. Podstawą reklamacji jest oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura).
2. Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w firmie **ACTIV** przyznawana jest 12 miesięczna gwarancja.
3. Koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa zamawiający.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być wypełnione czytelnie i zawierać:
 - dokładny adres reklamującego,
 - oryginalny dowód zakupu,
 - kontakt telefoniczny,
 - dokładny opis usterki,
 - sytuację w której stwierdzono usterkę,
5. Reklamacja zostaje rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru wraz z pełną dokumentacją na adres **ACTIV Potokowa 47, 54-105 Wrocław.**
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych dokumentów zawartych w punkcie 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego.
7. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego będą utylizowane po upływie 3 miesięcy.
8. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysyłania reklamowanego produktu od zamawiającego.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień klienta (kolor, itp) nie mogą być podstawą

reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji nie podlegają:

- żarówki
- bezpieczniki
- przewody zasilające
- produkty zalane wodą
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia,
- usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji,
- produkty z przeceny, wyprzedaży, ekspozycji.

Reklamacją objęte są wady fabryczne. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia z tytułu nieumiejętnego, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem!

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

.....

podpis sprzedawcy
pieczęć