

INSTRUKCJA OBSŁUGI F-806 DARSONVAL

Teoria Elektroterapii Wysokiej Częstotliwości

Urządzenie do elektroterapii wysokiej częstotliwości wytwarza prąd dużej prędkości obrotowej, który można zamienić na energię cieplną do zabijania bakterii. Ze względu na bardzo szybkie wibracje, nie powoduje on skurczy mięśni. Zapewnia za to fizyczną stymulację.

DZIAŁANIE

- Przyspieszenie krążenia krwi.
- Stymulacja aktywności gruczołów.
- Wspomaganie wydzielania i absorpcji skórnej
- Wspomaganie metabolizmu
- Zabijanie bakterii.
- Wytwarzanie energii cieplnej wewnątrz tkanki skórnej
- Wspomaganie przenikania kremów upiększających wewnątrz skóry

INSTRUKCJA

Wybierz odpowiednią elektrodę i umieść ją w wyjściu uchwytu, następnie podłącz ją do urządzenia. Pozycje elektrody:

- Elektroda w kształcie grzyba – do dużych obszarów skóry: twarz, czoło, szyja itp.
- Elektroda w kształcie łyżki – do średnich obszarów skóry: broda itp.
- Elektroda punktowa – do małych obszarów skóry: nos itp.
- Elektroda prosta – do zabiegów pośrednich.

UŻYCIE BEZPOŚREDNIE

- Weź uchwyt elektrody (nie należy dotykać elektrody dłońmi oraz przedmiotami metalowymi) i ustaw przycisk H/Energy na minimum.
- Włącz przycisk Hi-Frequency oraz H/Energy na minimum. Przyłóż elektrodę do części ciała, która ma być poddana zabiegowi, powoli przekręcaj przycisk Hi-Frequency w prawą stronę aż poczujesz łagodny prąd wysokiej częstotliwości. Jeśli skóra pokryta jest kremem lub maseczką, przesuwaj elektrodę w górę od szyi, powoli przesunij na brodę, twarz, policzek, nos i czoło. W trakcie zabiegu, powoli dostosuj przycisk H/Energy do odpowiedniego natężenia.
- Ponieważ tkanka skórna wytwarza energię cieplną, bezpośrednie zastosowanie elektroterapii może powodować komfortowe i uspokajające efekty a zarazem powoduje zabijanie bakterii. Stosowanie możliwe dla skóry przetłuszczającej się i z trądzikiem.
- Po zabiegu, powoli ustaw przycisk H/Energy na minimum oraz wyłącz Hi-Frequency i zabierz elektrodę z twarzy pacjenta.

UŻYCIE POŚREDNIE

Najpierw niech klient weźmie elektrodę prostą, włącz przycisk Hi-Frequency i

stopniowo ustawiaj H/Energy do pożądanego natężenia. Następnie, masuj część ciała pacjenta poddawaną zabiegowi. Podczas całego zabiegu, kosmetyczka nie dotyka elektrody. Przed zabraniem elektrody z twarzy pacjenta, należy wyłączyć urządzenie.

Użycie pośrednie wspomaga oraz przynosi uczucie komfortu skórze.

UWAGI

- Słupek elektrody iskrzy jeśli zatrzymana jest ona w odległości mniejszej niż 1 cal od skóry podczas gdy urządzenie jest włączone, należy zmniejszyć energię Hi-Frequency. Jeśli klient wciąż czuje iskrzenie, możesz położyć na twarz suchy ręcznik bawełniany ale nie z żadnego tworzywa sztucznego.
- Aby uniknąć porażenia elektrycznego, przed przyłożeniem elektrody do twarzy pacjenta należy ustawić najniższe natężenie i następnie dopiero je zwiększać.
- Przed zabraniem elektrody z twarzy klienta, należy ustawić przycisk H/Energy na minimum, wyłączyć urządzenie i dopiero zabrać elektrodę.
- Przy wkładaniu i wyjmowaniu elektrody, należy ustawić przycisk energii na minimum i wyłączyć urządzenie.
- Elektrody i rurki powinny być czyste, suche oraz wysterylizowane przed i po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIA

- Klienci powinni przed zabiegiem zdjąć wszystkie metalowe przedmioty jak np. elementy biżuterii.
- Urządzenia nie można stosować w przypadku kobiet w ciąży lub osób z rozrusznikami serca.
- Kremy i maseczki używane przy zabiegu nie mogą zawierać spirytusu. Jeśli konieczne jest użycie takich środków, należy to zrobić już po zabiegu.
- Nie należy dotykać elektrodą oczu.
- Zabronione jest dotykanie metalowej części uchwytu lub manipulowanie nim gdy urządzenie jest włączone

Urządzenie przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowane kosmetyczki.

Gwarancja 12miesięcy.

Importer : Fantoma ul. Lisowska 26/1,01-820Warszawa

tel 22 865 14 30, www.fantoma.pl

Urządzenie posiada certyfikaty zgodności