

- (1) Pokrętko ustawienia temperatury
- (2) Lampka wskaźnika pracy urządzenia (zielona)
- (3) Lampka wskaźnika zasilania (czerwona)
- (4) Pokrętko ustawienia czasu
- (5) Dodatkowe zabezpieczenie pogrzewacza

2.0. Instrukcja Obsługi

- 2.1 Włącz zasilanie, umieść narzędzie, które należy zdezynfekować do urządzenia i zakryj pokrywę.
- 2.2 Ustaw pokrętko czasu na żądany czas, od 0-120 minut i w tym samym czasie zaświeci się lampka wskaźnika na czerwono.
- 2.3. Ustaw pokrętko temperatury od 0-200 stopni Celsjusza i w tym samym czasie wskaźnik zielonej lampki zaświeci się, wtedy można przystąpić do dezynfekcji narzędzi.
- 2.4. Kiedy temperatura osiągnie ustawioną temperaturę, zielona lampka wskaźnika zgaśnie i urządzenie będzie w trybie podtrzymania temperatury. Kiedy wskaźnik czasu dojdzie do „0” dezynfekcja zostanie zakończona. Następnie należy otworzyć pokrywę i kiedy temperatura urządzenia spadnie do temperatury pokojowej można wyjąć narzędzie.
- 2.5. Kiedy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka Dodatkowe zabezpieczenie pogrzewacza (5) umieszczone z tyłu urządzenia automatycznie odetnie zasilanie; Kiedy urządzenie ponowi pracę należy poczekać aż temperatura urządzenia spadnie do temperatury pokojowej a następnie wcisnąć Dodatkowe zabezpieczenie pogrzewacza (5) i urządzenie rozpocznie ponownie pracę.
- 2.6. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie.

3.0 Parametry Pracy

Typ	Napięcie	Częstotliwość	Temperatura pracy	Zasilanie
T-18	<input type="checkbox"/> 110V <input type="checkbox"/> 220V	<input type="checkbox"/> 60Hz <input type="checkbox"/> 50Hz	5~40 stopni Celsjusza	270W

4.0 Ważne Uwagi

- 4.1 Przed użyciem należy sprawdzić, czy miejscowe napięcie jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- 4.2. Urządzenie przeszło przez ścisłe odpluskwanie i testy przed opuszczeniem fabryki i posiada ustawione doskonale zabezpieczenie układów elektrycznych, w przypadku, gdy pojawią się jakiegokolwiek problemy proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub naszą firmą i nie rozmontowywać urządzenia w celu naprawy, z wyjątkiem osób wykwalifikowanych.
- 4.3. Proszę z uwagą przechowywać urządzenie i części zapasowe po użyciu aby przedłużyć

5.0. Typowe problemy i ich rozwiązywanie

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji, wskaźnik lampki nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź miejscowe napięcie jest odpowiednie dla tego urządzenia 2. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zepsuta lub poluzowana 3. Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest zepsuty
Wskaźnik lampki działa ale lampka podczerwieni nie świeci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy lampka podczerwieni jest zamocowana 2. Sprawdź czy lampka podczerwieni jest uszkodzona, jeżeli tak należy ją zmienić
Inne problemy	Zwróć całe urządzenie do naprawy lub oddaj do naprawy fachowcowi

NOD32 Informacje 2600 (20071018)

Tłumaczenie przysięgłe z języka włoskiego:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Spółka **TAU STERIL s.n.c.** ul. Gorizia 6/a – 22073 Fino Mornasco – **COMO**
– **WŁOCHY**

Oświadczam, że niżej opisane UM

Sterylicator suchy

Nazwa handlowa

TAU STERIL MINI automatic n°

Przeznaczenie

**Sterylicacja przyborów chirurgicznych w zakresie medycznym i para
medycznym**

Klasa ryzyka **IIa** zgodnie z regułą **15** załącznika IX Dyrektywy 93/42/CEE (przyjętej we
Włoszech Dekretem Legislacyjnym z dnia 24 lutego 1997 nr 46 zmienionym Dekretem
Legislacyjnym z dnia 25 lutego 1998 nr 95.

- zgodne jest z wymogami i rozporządzeniem Dyrektywy 93/42/CEE według Karty
Technicznej nr **02**;
- wyprodukowane zostało zgodnie z Systemem Jakości spełniającym wymogi, o
których w załączniku V w/w dyrektywy, co wynika z Certyfikatu nr 019-9541/07-DM
odnowionego dnia 08.10.07 przez ITALCERT – viale Sarca 336, 20126 MILANO
Włochy (Organ notyfikacyjny 0426)

Fino Mornasco 14 LISTOPADA 2007

Pieczęć: TAU STERIL snc Giorgio Bianchi *NIECZYTELNY PODPIS*

Rep. nr89...../08 tłumacza przysięgłego

języka włoskiego i francuskiego.

Potwierdzam zgodność tłumaczenia z dokumentem,

który został mi przedstawiony.

Gorzów Wlkp. dnia 03.03.2008

